



مخازن طبی آبادیس
Abadis Med



راهنمای نصب مخازن بر روی پایه ترولے

مرحله ۱:

ایک قسمت شلنگ به خروجی وکیوم و سمت دیگر را به ورودی رگولاتور یا شیر نصب شده بر روی پایه ترولی نصب می کنیم.



مرحله ۲:

ابتدا محل حدودی قرار بگیری پایه ترولی در اتاق عمل را تعیین می کنیم و از خروجی وکیوم تا پایه ترولی را سایز کرده و شلنگ سیلیکونی $7*13$ ^{mm} را برش می زنیم.



مرحله ۳:

شلنگ سیلیکونی سایز $7*13$ ^{mm} را برش زده یک سمت شلنگ را به خروجی رگولاتور یا شیر و سمت دیگر را به اتصال T شکل در مخزن های دو و سه لیتری و کانکشن وکیوم در مخزن وکیوم در مخزن های یک لیتری وصل می کنیم.

بر روی مخزن های دو و سه لیتری اتصال T و کانکشن را متصل می کنیم از خروجی رگولاتور تا اتصال T شکل در مخزن های دو و سه لیتری و کانکشن وکیوم در مخزن های یک لیتری سایز میکنیم.



مرحله ۴:

برای تست عدم نشتی وکیوم خروجی رگولاتور مسیر وکیوم را کین می کنیم تا حداکثر میزان فشار منفی را بسنجیم ، سپس با بستن مسیر وکیوم مخزن (سوراخ داخل مخزن و کانکشن وکیوم) اگر به میزان حداکثر فشار وکیوم رگولاتور برسد در اتصالات نصب شده هیچگونه نشتی وجود ندارد.

